



Présentation

Le spray de nettoyage est présenté sous forme de flacon rempli de 30 ml, sans gaz propulseur. Il est équipé d'une valve, d'un diffuseur de précision et d'une brosse. Le spray de nettoyage est conditionné à l'unité.

Propriétés

Le spray de nettoyage est conçu spécialement pour dissoudre efficacement le cérumen sans endommager les aides auditives.

La formulation spécifique de la solution est conforme aux exigences de la norme bactéricide NF EN 1040 et de la norme levuricide NF EN 1275 tout en respectant les exigences environnementales et de sécurité pour la santé.

Le spray de nettoyage répond aux exigences de la catégorie des dispositifs médicaux de classe I, non stérile, au sens de la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Indications

Le spray de nettoyage est un produit d'hygiène utilisé pour l'entretien et le nettoyage des aides auditives et embouts auriculaires.

Le spray de nettoyage prévient des irritations cutanées et de l'eczéma.

Le spray de nettoyage élimine le cérumen responsable de la diminution de la qualité sonore, augmente la durée de vie des systèmes auditifs et préserve leur efficacité.

Conseils d'utilisation

Élimination du cérumen incrusté

Le cérumen peut se fixer en bordure des orifices de sortie du son des aides auditives ou embouts ainsi que des événements.

- Exercer une légère pression pour humecter les poils de la brosse à l'écart de l'appareil auditif.
- Frotter avec la brosse pour dissoudre et éliminer le cérumen.
- Essuyer votre appareil auditif avec un tissu sec et doux.

Nettoyage des surfaces de l'appareil auditif

- Pulvériser le spray sur un tissu sec et doux.
- Frotter avec le tissu les surfaces de l'appareil auditif jusqu'à évaporation complète.

Attention, ne jamais vaporiser de produit directement sur l'aide auditive.

Un nettoyage quotidien des aides auditives et embouts auriculaires est recommandé.

Précautions d'emploi

Usage externe.

Éviter le contact avec les yeux.

Tenir hors de portée des enfants.

Produit inflammable.

Composition du produit

- Eau purifiée
- Digluconate de Chlorhexidine
- Chlorure de benzalkonium 50%
- Alcool 96°
- Parfum menthe
- Abil 88183