



AUDIBEL

# INTRIGUE AI

- ITC R INTRIGUE AI 24 - PREMIUM+ ★★★★★
- ITC R INTRIGUE AI 20 - PREMIUM ★★★★
- ITC R INTRIGUE AI 16 - AVANCÉE ★★★



L'ITC R Intrigue AI s'alimente avec une batterie Lithium rechargeable. Réalisé sur-mesure d'après l'empreinte de l'oreille, il se loge dans le conduit auditif. Il peut être adapté pour les pertes auditives allant de moyennes à sévères. Il bénéficie de la technologie de processeur la plus avancée de l'industrie. Il est doté d'une nouvelle puce de traitement du son, le Processeur Neuro Audibel, ainsi que de capteurs intégrés, de l'intelligence artificielle et fonctionne avec une toute nouvelle application My Audibel. Cette nouvelle technologie offre un traitement jusqu'à 4 fois plus rapide que la génération précédente. Il est compatible avec les smartphones et les accessoires StarLink pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres medias.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				24	20	16	AVANTAGES
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique performant. Doté de 16 canaux et 16 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une bonne résolution sonore, offrant des performances satisfaisantes dans des environnements sonores avec des niveaux de bruit de fond peu importants.		
	Canaux   Bandes	24/24	20/20	16/16	Le bouton-poussoir permet de régler le volume et de changer les programmes.		
	Bouton-poussoir multifonction	●	●	●	L'autonomie peut varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans-fil. Fonctionne avec le chargeur 2.0 StarLink qui se branche sur le secteur et qui intègre la Recharge Turbo. Cette fonction s'effectue automatiquement lorsque la batterie est faible. Les aides auditives se chargeront rapidement pour offrir environ 3 heures d'utilisation en seulement 10 minutes de charge.		
	Technologie sans-fil 2,4 GHz	42 heures	42 heures	42 heures	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.		
	Neuro Processor	36 heures	36 heures	36 heures			
CONNECTIVITÉ							
Application My Audibel	pour les utilisateurs	●	●	●	La nouvelle application très conviviale, vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à surveiller votre santé et accéder à des informations utiles.		
Application Hear Share	pour les aidants	●	●	●	Vous partagez des informations utiles telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions sociales avec les personnes de votre choix.		
<p><b>IMPORTANT :</b> Les applications My Audibel et Hear Share permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site <a href="http://www.audibel.fr">www.audibel.fr</a></p> <p style="text-align: right;"><b>Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone !</b></p>							
PERFORMANCES AUDITIVES	<b>NOUVEAU</b> Procésseur Neuro Audibel <i>Plus petit mais plus puissant que tous les processeurs précédents.</i> Grâce à la technologie Neuro Sound, Intrigue effectue plus de 80 millions d'ajustements par heure, pour offrir une sonorité transparente et une clarté d'audition jamais expérimentée auparavant.	Amélioration des consonnes	●			Non disponible	
		Voice AI	●			Non disponible	
		Mode Edge +	●			Vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Le Mode Edge+ scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin en l'activant via l'application My Audibel.	
		Contrôle tactile	●				
		Personnalisation	●	●			
		Contrôle Appli	●	●	●		
		Streaming audio direct	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.	
Audio bidirectionnel	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad, vous permettant de converser simplement en mains libres.			
Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	Permet de redécouvrir la musique.			
SOUND MANAGER	GESTIONNAIRE DE SONS Algorithmes de traitement du son	Synchronisation d'oreille à oreille	●●●●	●●	●	Garantit un son de bonne définition pour offrir une expérience auditive plus naturelle.	
		Amélioration spatiale de la parole	●●●●	●●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.	
		Réduction du bruit	●●●●	●●	●	Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une qualité sonore confortable dans les environnements bruyants.	
		Silence	●	●	●		
		Réduction des bruits mécaniques	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément.	
		Parole dans le bruit	●●●●	●●	●	Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute.	
TRAITEMENT DIRECTIONNEL	Microphones directionnels (en option)	Adaptatif	●●●●	●●	●	Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.	
		Dynamique	●	●	●		
		Traduction	●			Non disponible	
		Transcription audio texte	●	●	●	Non disponible	
		Assistant	●	●	●	Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.	
		Trouver mon téléphone	●	●	●	Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».	
		TeleHear	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.	
ASSISTANT INTELLIGENT	NOUVEAU Engagement & Suivi d'activité	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	Cette fonction a été améliorée avec plus de classifications que n'importe quelle aide auditive disponible sur le marché : Etapes, Debout, Exercices tels que Marcher, Courir, Vélo intérieur et Aérobic. Les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).	
		Détection et alertes en cas de chute	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.	
		Rappels vocaux	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.	
		Auto On/Off	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.	
		Contrôle tactile	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.	
		Self Check	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.	
		AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Annulateur de larsen	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●		●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)		
COMPATIBILITÉ AVEC LES ACCESSOIRES STARLINK :							
MINI MICROPHONE, MICROPHONE +, ÉMETTEUR TV, MICROPHONE DE TABLE ET TÉLÉCOMMANDE				●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

1) Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.