


FICHE TECHNIQUE PATIENT



mRIC R OMEGA AI
Écouteur déporté
Rechargeable

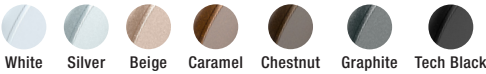

- mRIC R OMEGA AI 24 (PREMIUM+)
- mRIC R OMEGA AI 20 (PREMIUM)
- mRIC R OMEGA AI 16 (AVANCÉE)

DESCRIPTION

Micro-contour connecté rechargeable avec écouteur inséré dans le conduit. Très discret et ultra-confortable. Il peut-être adapté pour toutes les pertes auditives en configuration standard ou sur-mesure. Technologie sans-fil 2,4 GHz basée sur la plateforme Neuro Processeur Starkey G3, avec une optimisation des fonctions directionnelles et spatiales pilotées par le DNN ; suivi de santé enrichi et expérience utilisateur améliorée grâce à l'IA générative.



LPP Classe II

Rechargeable
Lithium-ion

Connectivité
universelle

Capteurs
inertiels

Réglages
à distance

Bluetooth®
LE Audio
Auracast™

Intelligence
artificielle
avancée

Assistant
intelligent
(IA)

Optimisation
du signal vocal
en temps réel

Communications
mains libres

Surveillance
santé individuelle

Gestion des
acouphènes

APPLICATIONS INTELLIGENTES



My Starkey
pour les utilisateurs



HearShare
pour les aidants

Cette application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à surveiller votre santé et accéder à des informations utiles.

Vous partagez des informations telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions avec les personnes de votre choix.

IMPORTANT : Ces applications permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. Nous vous conseillons donc de vérifier la compatibilité de votre smartphone sur notre site internet www.starkey.fr ou en flashant ce QR Code.



Performances

Technologie
Neuro
Processeur
G3

GAMME TECHNOLOGIQUE	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	AVANTAGES
Canaux de réglages Bandes de compression	24/24	20/20	16/16	Niveau technologique très performant. Doté de 20 canaux et 20 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une haute résolution sonore, offrant de bonnes performances dans toutes sortes d'environnements.
Autonomie de la batterie streaming : sans/avec	41 heures 33 heures	41 heures 33 heures	41 heures 33 heures	L'autonomie peut varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans-fil. Fonctionne avec les chargeurs StarLink 2.0 avec batterie intégrée (Premium) ou sans batterie intégrée.
Indice de protection NOUVEAU	IP68+	IP68+	IP68+	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les saletés. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. En plus de l'IP68, l'aide auditive est dotée de la nouvelle technologie Pro10 HydraShield, qui la rend résistante aux défis du quotidien et étanche jusqu'à 1 mètre pour une durabilité renforcée.
Contrôle utilisateur	●	●	●	Équipé d'un commutateur multifonction permettant de régler le volume et de changer les programmes.

Performances
auditives

Technologie
Neuro Sound
2.0

Luminosité des consonnes	● ● ● ●	●	●	Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la parole.
Voice AI	●			Non disponible
Mode Edge+ Optimisation du signal vocal en temps réel	● ● ● ● Adaptatif Personnalisation App	● ● Personnalisation App	● App	Avec le Mode Edge+ qui agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle.
Streaming direct audio via le Bluetooth®	●	●	●	Vous pouvez recevoir des appels, écouter de la musique dans vos aides auditives avec votre smartphone, tablette et autres appareils audio ; et profiter de vos programmes TV préférés grâce à un accessoire sans-fil.
Audio bidirectionnel Communications mains libres	●	●	●	Les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers votre smartphone, vous permettant de converser simplement en mains libres. Possibilité de répondre/refuser un appel.
Adaptatif	● ● ● ●	● ●	●	Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.
Dynamique	●	●	●	
Traitement musique	● ● ● ●	● ●	●	Permet de redécouvrir la musique grâce à un traitement de signal dédié.
Réducteur de bruit	● ● ● ●	● ●	●	Réduction du bruit basée sur le DNN. Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une bonne qualité sonore, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements bruyants.

Directionnel
Microphones
directionnels

Sound
Manager
(Gestionnaire
de sons)
Algorithmes
de traitement
du son

DNN 360

NOUVEAU Directionnalité DNN	●			Non disponible
NOUVEAU Perception spatiale DNN	●			Non disponible
Calm	● ● ● ●	● ●	●	
Bruits mécaniques	● ● ● ●	● ●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément.
Parole dans le bruit	● ● ● ●	● ●	●	Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute.
Bruits transitoires	● ● ● ●	● ●	●	
Vent	● ● ● ●	● ●	●	

Autres fonctions avancées	Tinnitus Multiflex <i>Gestion des acouphènes</i>	 Pro	 Pro		Offre une grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
	Annulateur de Larsen				Système pro-actif de gestion des Larsens qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
	Duplication fréquentielle				Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.

Fonctions télésanté et fonctions pratiques

Voyant lumineux (LED)		NOUVEAU La LED vous informe instantanément des alertes et du statut de votre aide auditive. S'active par défaut pendant 3 secondes au démarrage ou à l'arrêt, et également avec la fonction "Trouver mes aides auditives" pour faciliter sa localisation.
Surveillance fréquence respiratoire		NOUVEAU Votre fréquence respiratoire au repos est mesurée automatiquement et affichée en cycles par minute, vous permettant de suivre facilement votre état de santé et de mieux comprendre votre respiration.
Exercices d'équilibre		NOUVEAU Vous améliorez votre équilibre avec des exercices adaptés, accompagnés de données sur vos mouvements pour suivre vos progrès et repérer les évolutions.
Évaluation de l'équilibre		Vous dépistez rapidement vos troubles de l'équilibre à distance grâce à des tests guidés et analysés automatiquement.
Engagement & Suivi d'activité		Suivi de l'activité physique et de l'engagement social pour atteindre des objectifs santé.
TeleHear <i>Réglages à distance</i>		Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance, sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
Détection et alertes en cas de chute		Détection d'une chute et envoi d'un message d'alerte à des contacts prédéfinis.
Auto On/Off		Préservation de l'énergie de vos aides auditives lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Double tap		Tapoter 2 fois pour activer la fonction paramétrée.
Self Check		Test diagnostique des composants de vos aides auditives.

Fonctions intelligentes

NOUVEAU IA générative, intégrée dans deux nouvelles fonctions. 	
TeleHear AI <i>Ajuste instantanément vos aides auditives selon des milliers de réglages professionnels.</i>	
Assistant intelligent Gen AI <i>Répond à vos questions vocales et fournit des infos détaillées sur vos aides auditives et d'autres sujets.</i>	
Traduction	
Transcription audio-texte	 
Assistant intelligent	 
Rappels intelligents	 
Trouver mes aides auditives	 

Accessoires sans-fil

Connectivité avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	
Accessoires StarLink Edge <i>Microphone à distance</i> <i>Microphone de table</i> <i>Émetteur TV</i> <i>Télécommande StarLink 2.0</i>	Apple Watch <i>Montre connectée servant d'interface pour votre iPhone</i> My Starkey : Possibilité d'activer le Mode Edge+, de changer de programme et de régler le volume.

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires StarLink fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.



Apple Watch est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Les termes « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone, un iPad ou une Apple Watch peut affecter les performances sans fil. Google Play est une marque déposée de Google, LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par Starkey se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le logo Audibel, Audibel Aris, TeleHear, Edge Mode, Hear Share, StarLink, Audibel Neuro Processor, Neuro Sound Technology et Multiflex Tinnitus sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.